



Sofia®  
SARS Antigen FIA



Precision  
Biomonitoring

# Résultats Objectifs pour SARS-CoV-2 à Porté de Main

Le premier test d'antigène rapide autorisé pour les tests en série chez les populations asymptomatiques au Canada



Résultats Précis, Objectifs et Automatisés en **15 minutes**



**Tests en série chez les populations asymptomatiques** au moins tous les 3 jours/72 heures (sensibilité 91.6%)



**Échantillonnage nasal** avec les écouvillons fournis dans la trousse



**Excellentes performances** comparées aux méthodes moléculaires (sensibilité 96.7%)\*



Durée de conservation jusqu'à **24 mois**



**Flexibilité, double mode de test** pour une cadence élevée dans des environnements variés




**Permet la gestion des données** et la capture des ID utilisateur et patient avec le **lecteur de codebare intégré**



Pour les patients dans les cinq premiers jours suivant l'apparition des symptômes

# Sofia SARS Antigen FIA – Procédure



## Procédure Écouvillon Nasal

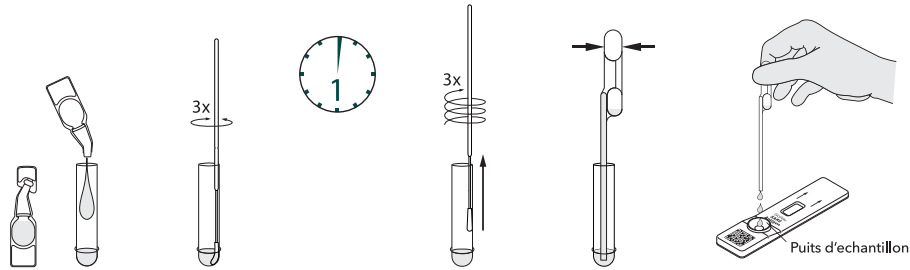

### Modes de Développement du Sofia

**Mode WALK AWAY (différé) –**  
Sans intervention, pour le multitâche

**Mode READ NOW (immédiat) –**  
En lot, plusieurs échantillons par heure

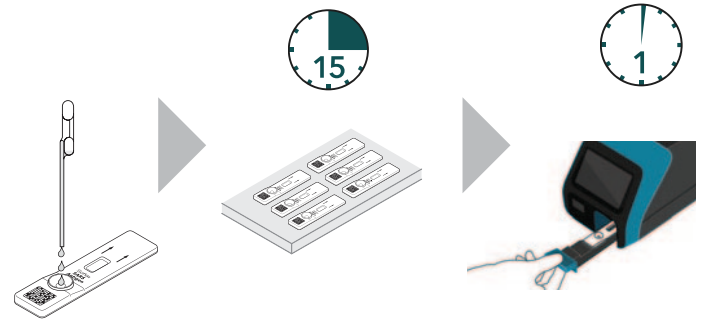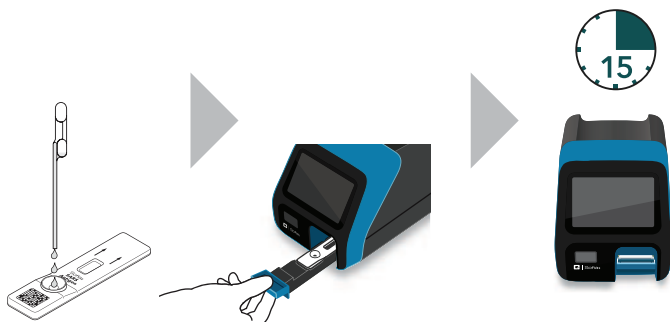

### Sofia SARS Antigen FIA

- Échantillon nasal
- Détection précise directement de l'échantillon
- Résultats en 15 minutes
- Trousse incluant 25 écouvillons nasaux stériles et une paire d'écouvillons contrôles (Pos & Neg)
- Stockage à température ambiante
- Durée de conservation de 24 mois

### Sofia SARS Antigen FIA Performances Cliniques\*

	Test RT-PCR de référence					95% CI		
	POS	NEG	Total	PCP	96.7%	83.3%	99.4%	
Test Sofia SARS Antigen FIA	POS	29	0	29	PCN	100.0%	97.9%	100.0%
	NEG	1	179	180	VPP	100.0%	88.3%	100.0%
	Total	30	179	209	VPN	99.4%	96.9%	99.9%
					Prévalence	14.4%	7.4%	14.3%
					% concordance	99.5%		

Prière de vous référer à la notice de produit pour le design et les explications



Sofia SARS Antigen FIA – Trousse de 25 Tests (écouvillons nasaux): #Cat. 20378  
Analyseur Sofia 2 – #Cat. 20300  
Trousse d'installation Sofia 2 – #Cat. 20314

SS20378302CF00 (06/21)

Distribué au Canada par:

**Precision Biomonitoring Inc.**

Pour des informations à propos du produit veuillez contacter: [sales@precisionbiomonitoring.com](mailto:sales@precisionbiomonitoring.com)

Pour le support technique: [support@precisionbiomonitoring.com](mailto:support@precisionbiomonitoring.com) | [precisionbiomonitoring.com](http://precisionbiomonitoring.com) | +1 888-444-7702

